

## 个人用工具组包装插页


在收集样本前请仔细阅读包装插页的所有说明  
若未能正确执行试验，试验结果可能无效

### 样本置放


1. 将所提供的收集纸放置在坐便器便盆的水面上
2. 将大便样本置于收集纸上
3. 在收集纸沉下去、大便样本接触水面之前，收集大便样本
4. 冲水。收集纸可生物降解，因此不会损害排污系统

### 样本收集


1. 在样本瓶上填写所需信息

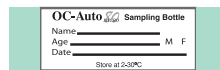

旋转提起绿色瓶盖打开

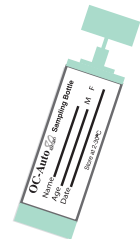

2. 用取样探头擦取排泄物样本表面

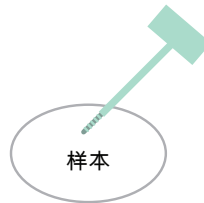


将样本探头带槽的部分完全覆盖大便样本



3. 插入取样探头，并压紧绿色瓶盖，关闭取样瓶请勿再打开



将样本装置用所提供的信封送交实验室，请勿将其寄给 Polymedco

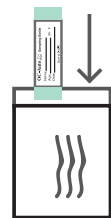

**Please include CLH requisition with your specimen in the return envelope.**

Please visit our website to access a collection instruction video:  
<http://www.clinicallabs.com/physicians/collection-instructions.aspx#FOBT>

#### Client Services