

개인용 변채취 세트 사용 안내

샘플을 채취하기 전에 모든 변채취 세트 사용 지침을 주의 깊게 읽어주십시오. 검사가 적절하게 이루어지지 않으면 검사 결과가 올바르지 않을 수 있습니다.

채변 준비


1. 제공받은 변채취 용지를 변기 수면위 띄웁니다.
2. 변채취 용지 위에 대변을 봅니다.
3. 용지가 가라앉아 대변 샘플이 수면에 닿기 전에 대변을 채취합니다.
4. 변기의 물을 흘리세요. 변채취 용지는 미생물에 의해 친환경적으로 분해되므로 수질 정화 시스템에 문제를 야기하지 않습니다.

채변 방법

1. 샘플 용기에 필요한 정보를 기입합니다. 녹색 캡을 돌린 후 당겨서 엽니다.



2. 샘플 프로브로 배설물의 표면을 긁어냅니다.

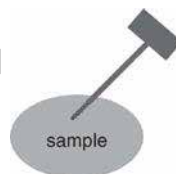


샘플 프로브의 흡이 파인 부분이 완전히 덮일 만큼 대변 샘플을 채취합니다.



3. 샘플 프로브를 넣고 녹색 캡을 단단히 끼워 변채취 용기를 닫습니다. 닫은 후에는 다시 열지 마십시오.



제공된 봉투에 변채취 용기를 넣어 담당 의사 또는 연구원에게 반납합니다. Polymedco 로 우편 발송하지 마십시오.

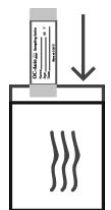

Please include CLH requisition with your specimen in the return envelope.

Please visit our website to access a collection instruction video:
<http://www.clinicallabs.com/physicians/collection-instructions.aspx#FOBT>

Client Services