

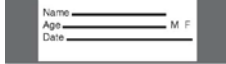

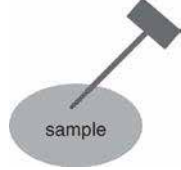



個人使用キット用添付文書

添付文書の指示をすべて良く読んでからサンプルを収集してください。
試験を正しく実施しないと試験結果が無効になる場合があります。

サンプルの付着

1. 用意された収集紙を便器の水面上に置いてください。
2. 糞便サンプルを収集紙上に付着させてください。
3. 糞便からサンプルを収集してから、収集紙を沈め、サンプルが水に触れるようにしてください。
4. トイレに流します。収集紙は生物分解性ですので、腐敗システムの害となることはありません。

サンプルの収集

1. サンプル瓶上に必要な情報を書き入れます。
 緑のキャップをひねり持ち上げて、キャップを空けてください。

2. サンプル用プローブで糞便サンプル表面をひっかくようにしてください。
 サンプル用プローブの溝部分が完全に糞便サンプルで覆われるようにしてください。

3. サンプル用プローブを瓶の中に入れ、緑のキャップをしっかりと締めて、サンプル瓶の蓋を閉じてください。決して再び開けないでください。
 サンプル瓶を医師か包みに記載された試験所に返却してください。Polymedco に郵送しないでください。


Please include CLH requisition with your specimen in the return envelope.

Please visit our website to access a collection instruction video:
<http://www.clinicallabs.com/physicians/collection-instructions.aspx#FOBT>

Client Services