

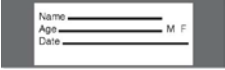

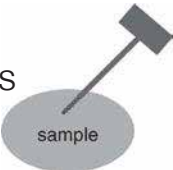



Lakip sa Pakete para sa Kit na Pangsariling Gamit

Basahin nang mabuti ang lahat ng tagubilin sa nakalakip bago kumuha ng sample. Maaaring maging imbalido ang resulta kung hindi maisagawa nang tama ang pagsubok.

Paglagay ng Sample

1. Ilagay ang ibinigay na papel na pangkolekta (collection paper) sa loob ng inodoro, sa ibabaw ng tubig.
2. Ilagay ang sample ng dumi sa ibabaw ng papel.
3. Kunin ang sample mula sa dumi bago lumubog ang papel at bago mabasa ng tubig ang dumi.
4. Mag-flush. Ang papel na pangkolekta ay nabubulok (bio-degradable) at hindi makasisira sa poso-negro.

Pagkuha ng Sample

1. Punan ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa botelya ng sample (sampling bottle).  Buksan ang berdeng takip sa pamamagitan ng pagpihit at pag-angat. 
2. Ikayag ang sa ibabaw ng dumi gamit ang pangkayag sa dumi (sample probe).  Balutin nang husto ng dumi ang bahagi ng pangkayag na may ukit. 
3. Isara ang botelya sa pamamagitan ng pagpasok sa pangkayag at isara nang mahigpit ang berdeng takip. Huwag muling buksan.  Ibalik ang botelya ng sample sa iyong doktor o laboratoryo sa loob ng ibinigay na sobre. Huwag ipakoreo sa Polymedco. 

Please include CLH requisition with your specimen in the return envelope.

Please visit our website to access a collection instruction video:
<http://www.clinicallabs.com/physicians/collection-instructions.aspx#FOBT>

Client Services